

# FDV-dokumentasjon

Produkt: 8899799599090 1

BANDASJETAPE 2,5CM X 9 M,  
MED HOLDER



## Brannskadekoffert

**Art. nr. 8899 700 100**

- Water-Jel begrenser skaden
- Avkjøler brannskaden
- Gir god smertelindring
- Reduserer infeksjonsfaren

Water-Jel brannbandasjer legges snarest mulig direkte på skaden, etter at klær som ikke er fastbrent er fjernet fra skadestedet. IKKE riv løs, men klipp rundt fastbrent tøy, og legg Water-Jel over hele skadestedet. Hell på all gel i pakningen og fikser brannbandasjen med løstsittende gasbind og bandasjetape. Oppsøk lege snarest.

### Innhold

Betegnelsen	Art. nr.	Pk./stk.
Water-Jel ansiktsbandasje	<b>8899 722 668</b>	1
Water-Jel 20x45 cm, steril	<b>8899 720 365</b>	2
Water-Jel 10x10 cm, steril	<b>8899 720 548</b>	2
Water-Jel 5x15 cm, steril	<b>8899 722 577</b>	2
Water-Jel cooljel 3,5g dose, 6 pk.	<b>8899 740 455</b>	4
Gasbind elastisk 8 cm x 4 m	<b>8899 741 051</b>	4
Bandasjetape 2,5 cm x 9 m med holder	<b>8899 799 599</b>	4



## Brannteppe i beholder

Betegnelsen	Art. nr.	Pk./stk.
Brannteppe 183x152 cm	<b>8899 720 241</b>	1
Brannteppe 91x76 cm	<b>8899 720 266</b>	1

Brannteppe til større skader. Et nødvendig produkt ved alvorlige skader. Pakk pasienten inn i teppet, hel på overskytende gele. Transporter til lege- sykehus.

Water-Jel brannbandasjer legges snarest mulig direkte på skaden, etter at klær som ikke er fastbrent er fjernet fra skadestedet. IKKE riv løs, men klipp rundt fastbrent tøy, og legg Water-Jel over hele skadestedet. Hell på all gel i pakningen og fikser brannbandasjen med løstsittende gasbind og bandasjetape. Oppsøk lege snarest.



## Burnjel

**Art. nr. 8899 742 932**

Smertelindrende gel til bruk på mindre forbrenninger og lettere brannskader, insektsstikk, brennmaneter etc. Kommer i praktisk pumpeflaske på 60ml.